


Duo-Check®

二重チェックの滅菌バッグ/パウチ

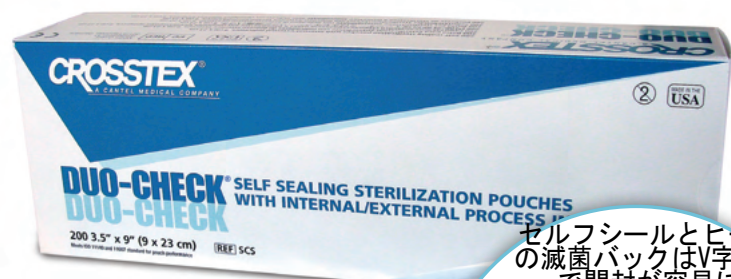

セルフシールとヒートシールの滅菌バッグはV字形の切り目で開封が容易にできます。



二重の信頼!

Duo-Check® 滅菌バッグは内部と外部のインジケーターにより滅菌物の保持が三年間保たれます。
蒸気滅菌とEOG滅菌には同様に適合いたします。

- ・シングルユース バッグは再利用器具の滅菌に最適です。
- ・メディカル グレード ペーパーと特別な幅のV字形のシール状の滅菌バッグは器具の滅菌性の向上に寄与いたします。
- ・ピンクの矢印は蒸気滅菌に暴露しますと薄茶色に変わります。
EOGガスに暴露しますと、こげ茶色に変わります。
- ・滅菌バッグはISO 11140と11607標準に合致しております。
- ・ANSI/AAMI ST79の蒸気滅菌の包括的な指針とヘルスケア施設の保証指針に合致しております。
- ・米国FDAの承認を受けております。

滅菌の確認について

CDCのガイドラインは次の事柄を明解にします: 滅菌の主要素である滅菌時間、温度、蒸気の三要素を確認する唯一の方法です。

Duo-Check 滅菌バッグとSTEAM Plus滅菌インテグレーターを用いることにより滅菌の三要素をケミカルインジケーターから高いレベルの無滅保証を表示します。



製造元 **Crosstex** 10 Ranick Rd, Hauppauge NY 11788-4209 USA

(LATEX) = 天然ゴム製ではありません。



セルフシール二重チェック滅菌バック

概要	数量	商品番号
5 x 20 cm	200/箱	SCZ
6 x 10 cm	200/箱	SCXX
7 x 23 cm	200/箱	SCX
8 x 23 cm	200/箱	SCQ
9 x 13 cm	200/箱	SCXS
9 x 23 cm	200/箱	SCS
9 x 23 cm	500/箱	SCS5
11 x 28 cm	200/箱	SCB1X
13 x 25 cm	200/箱	SCM
13 x 38 cm	200/箱	SCL515

20 x 41 cm	200/箱	SCL816
30 x 38 cm	100/箱	SCL1215
25 x 38 cm	100/箱	SCL1015
30 x 46 cm	100/箱	SCL1218

ヒートシール二重チェック滅菌バック

概要	数量	商品番号
8 x 25 cm	200/箱	SC310HS
10 x 20 cm	200/箱	SC48HS
12 x 28 cm	200/箱	SC411HS
15 x 25 cm	200/箱	SC610HS
15 x 56 cm	200/箱	SC622HS
19 x 33 cm	200/箱	SC713HS
25 x 38 cm	200/箱	SC1015HS


ロール状の滅菌バック

概要	数量	商品番号
2" Roll	100 ft	RST-002
3" Roll	100 ft	RST-003
4" Roll	100 ft	RST-004
6" Roll	100 ft	RST-006
8" Roll	100 ft	RST-008
10" Roll	100 ft	RST-010

滅菌バッグには併せてTyvek®製のセルフシールバックとロール状オプションがございます。

Duo-Check®

二重チェックの滅菌バック/パウチ

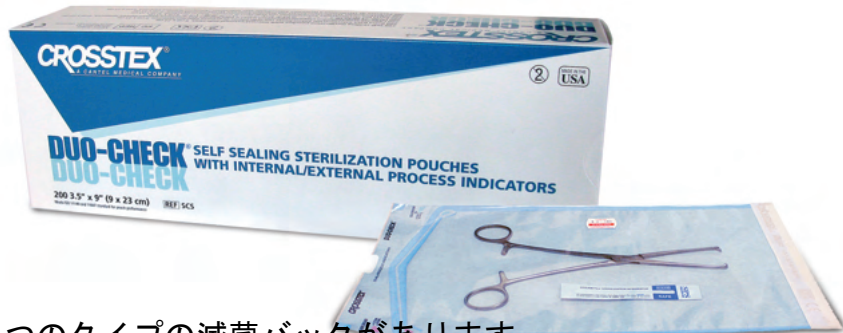

2つのタイプの滅菌バックがあります。
二重チェックの滅菌バックにはヒートシールとセルフシールがあります。皆様の用途に最適なタイプをお選び下さい。

- | | Self Seal Duo-Check | Heat Seal Duo-Check |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 安全なシール
二重チェックの滅菌バックはV字形のシール状で器具の滅菌性の向上に寄与します。 | ✓ | ✓ |
| 2 メディカル グレード ペーパー
湿度に強く処理され、無垢のメディカルグレードペーパーは医療用滅菌バックの標準に適合又はそれ以上の優位性があります。 | ✓ | ✓ |
| 3 青色の透明フィルムを使用
中の滅菌物の確認やフィルムの傷などの確認が容易に行えます。 | ✓ | ✓ |
| 4 幅広のセルフ シールの粘着部
容易に安全にバックはシールされ、バックが開けられるまでシールは保持されます。 | ✓ | |
| 5 ヒート シールの範囲
滅菌バックは手動のヒートシーラで簡単にシールできます。シールはバックを開けるまで完全に保持されます。 | | ✓ |
| 6 ミシン目のある折りたたみ部
接着部の折りたたみは滅菌バックが開けられるまで気密性を容易に保持します。 | ✓ | |
| 7 ペーパーとフィルムは完全に独立しております。
ペーパーとフィルムは高い品質の素材と粘着性の機能により滅菌物の無菌性を持続的に保持します。 | ✓ | ✓ |
| 8 V字形の刻み目
滅菌バックを開けることが容易におこなえます。 | ✓ | ✓ |
| 9 6ヶ所の折り返しシール
滅菌後のバックの角がねじ曲がることを防いだり、折り返し部は塵埃やシール部分の汚染を防ぎます。 | ✓ | ✓ |
| 10 プロセス インジケーター
内部と外部のインジケーターは滅菌の熱により色が変わります。
蒸気滅菌に暴露しますと薄茶色に変わります。EOGガスに暴露しますとこげ茶色に変わります。
このインジケーターは蒸気滅菌用とEOGガス滅菌用のみです。 | ✓ | ✓ |


Self Seal Duo-Check	Heat Seal Duo-Check
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	
	✓
✓	
✓	✓
✓	✓
✓	✓

SURE-CHECK® 滅菌バック/パウチ

あなたはこのバックで三倍の信頼を得ます。



Sure-Check™ 滅菌バック

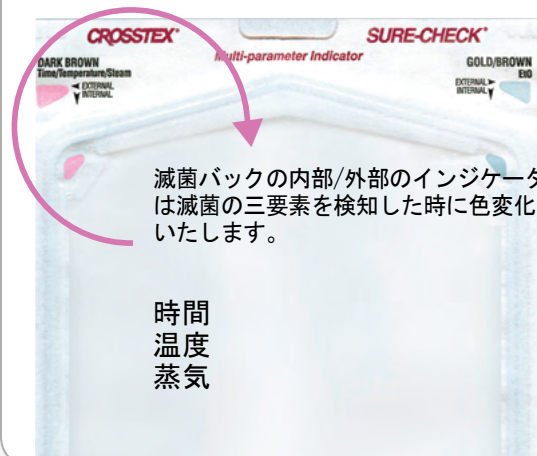

滅菌バックの内部/外部のインジケータ
ーは滅菌の三要素を検知した時に色変化
いたします。

時間
温度
蒸気

滅菌の唯一の確実性はSURE-CHECK 滅菌バックを用いることです。

CDCのガイドラインは次の事柄を明解しております。
滅菌の主要素である滅菌時間、温度、蒸気の三要素を確認すること
が唯一の方法です。
今までのところ伝統的な滅菌バックの内部又は外部のプロセス
インジケータで温度に反応するのが唯一の方法です。

Sure-Check® 滅菌バックの内部/外部の温度に敏感なインジケータ技術は滅菌の三要素確認に
合致しております。

滅菌のCDCに準拠するために、今まで以上に滅菌について確認が必要です。それはSURE-CHECKが必要とゆうことです。

Sure-Check®:


- ヘルスケア施設における消毒及び滅菌のCDCガイドライン2008に合致しております。
- 独立した試験施設により試験され認証を受けております。
- 一週間に一度バイオロジカル モニターと共に用いることにより、伝統的な滅菌バッグとプロセス インジケータで温度のみを測定するのと違い高いレベルの滅菌保証が得られます。
- 蒸気滅菌とヘルスケア施設の滅菌保証の包括的なガイドラインANSI/AAMI ST79に合致しております。
- 各々の滅菌バックに多くの変動性のあるインジケータを入れる作業を除くことができます。
- 米国FDAの承認を受けております。

* 変性のあるインジケータ: 多変性のインジケータは2つ又はそれ以上の主要な変性に反応するように設計されていなければならず、選択した変性の記載値で滅菌サイクルへの暴露を示すものです。

Sure-Check 滅菌バックは有害廃棄物としての配慮は必要ありません。通常の廃棄物として廃棄して下さい。
(40 CFR 261.24 tested using the TCLP, EPA 出版 SW-846).

特許取得

株式会社センコム

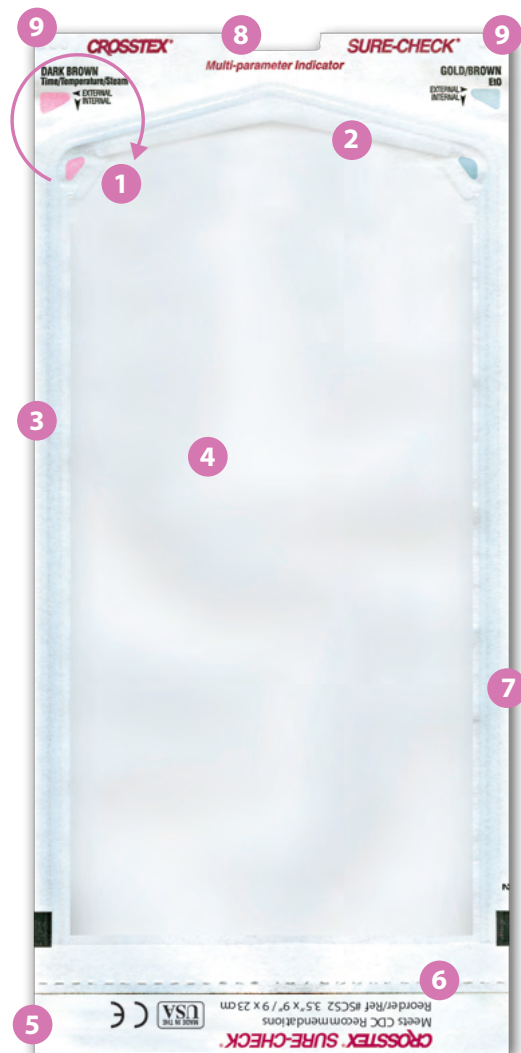

無菌性は目で確認できませんが
Sure-Checkで確認できます。

- ① 滅菌バック内部/外部のインジケーター
滅菌の主要三要素を検知した時のみ、色変化致します。
三要素: 時間、温度、蒸気。
- ② 安全なシール
幅広のV字形シールは器具の滅菌性の向上に寄与します。
- ③ メディカル グレード ペーパー
湿度に強く処理され、医療用滅菌バックの標準に適合です。
- ④ 透明なフィルム
中の滅菌物の確認が容易に行えます。
- ⑤ 幅広のセルフ シールの粘着部
バックは容易に安全にシールされ、バックが開けられるまで
約三年間滅菌性は保持されます。
- ⑥ ミシン目のある折りたたみ部
接着部の折りたたみは滅菌バックが開けられるまで
気密性を保持します。
- ⑦ ペーパーとフィルムは完全に独立しております。
ペーパーとフィルムは高い品質の素材と粘着性の機能により
滅菌物の無菌性を持続的に保持します。
- ⑧ V字形の刻目 滅菌バックの開閉が容易に行えます。
- ⑨ 角の折り返しシール
折り返しシールは滅菌後のバックの角がねじ曲がることを
防いだり、塵埃やシール部の汚染を防ぎます。

発注情報



14種類の大きさがあります。

概要	数量	商品番号
.6 x 10 cm	200/箱	SCXX2
7 x 23 cm	200/箱	SCX2
9 x 13 cm	200/箱	SCXS2
9 x 23 cm	200/箱	SCS2
9 x 23 cm	500/箱	SCS25
9 x 56 cm	100/箱	SCL3222
13 x 17 cm	200/箱	SCW2
13 x 25 cm	200/箱	SCM2
13 x 38 cm	200/箱	SCL5152
19 x 33 cm	200/箱	SCL2
20 x 41 cm	200/箱	SCL8162
25 x 38 cm	100/箱	SCL10152
27 x 43 cm	100/箱	SCL10172
30 x 38 cm	100/箱	SCL12152
30 x 46 cm	100/箱	SCL12182

商品の御要望は輸入販売元の株式会社センコムへ
電話 03-3839-6321 Email info@senkom.com



製造元 Crosstex社

10 Ranick Road
Hauppauge, NY 11788-4209 USA

輸入総発売元 **株式会社センコム**

〒110-0016 東京都台東区台東4-1-9

TEL.03-3839-6321 FAX.03-3839-6324

Email: info@senkom.com www.senkom.com

SK05312016/122517 Rev01

